

SILBERNITRAT- KALIUMNITRAT ÄTZSTÄBCHEN

MEDIZINPRODUKT

BITTE LESEN SIE DIE GEBRAUCHSINFORMATION SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE MIT DER ANWENDUNG STARTEN.

Wenden Sie dieses Medizinprodukt immer genau wie in der Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen, einen Rat benötigen oder Nebenwirkungen bemerken. Wenn sich nach mehrmaliger Anwendung kein Erfolg zeigt oder gar eine Verschlechterung eintritt, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

INHALTE DER GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Was sind Silbernitrat-Kaliumnitrat Ätzstäbchen und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Silbernitrat-Kaliumnitrat Ätzstäbchen beachten?
3. Wie sind Silbernitrat-Kaliumnitrat Ätzstäbchen anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen können auftreten?
5. Wie sind Silbernitrat-Kaliumnitrat Ätzstäbchen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS SIND SILBERNITRAT-KALIUMNITRAT ÄTZSTÄBCHEN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Silbernitrat-Kaliumnitrat Ätzstäbchen sind Ätzstäbchen aus Holz oder Kunststoff, an deren Ende eine Mischung aus Silbernitrat und Kaliumnitrat aufgebracht ist. Durch Zuführen von Feuchtigkeit werden die Ätzstäbchen einsatzbereit. Silbernitrat-Kaliumnitrat Ätzstäbchen ermöglichen eine einfache, punktuelle Handhabung, sodass die Wirkung auf genau begrenzte Stellen beschränkt bleibt.

Silbernitrat-Kaliumnitrat Ätzstäbchen werden zur chemischen Kauterisierung bei oberflächlichen Blutungen, bei Nasenbluten, zur Behandlung von Warzen, von Schleimhautläsionen im Mund- und Genitalbereich und bei überschießender Wundgranulation (wildes Fleisch) angewendet. Weitere Anwendungsbereiche sind aphthöse Stomatitis, Entfernung von Nabelschnurresten sowie der

Einsatz im Wundmanagement, z. B. bei der Stomaversorgung.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON SILBERNITRAT-KALIUMNITRAT ÄTZSTÄBCHEN BEACHTEN?

Die Silbernitrat-Kaliumnitrat Ätzstäbchen dürfen nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch gegen Silbernitrat oder Kaliumnitrat sind. Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis eine Verfärbung der behandelten Stelle auftritt.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Bei allen ungewöhnlich gefärbten oder ungewöhnlich geformten Hautveränderungen, die nicht eindeutig als „wildes Fleisch“ oder als einfache Warzen zu erkennen sind, sollen die Ätzstäbchen nur unter ärztlicher Kontrolle angewendet werden.
- Das Köpfchen des Silbernitrat-Kaliumnitrat Ätzstäbchens nicht mit feuchten Händen anfassen.
- Schützen Sie Ihre Kleidung und andere Gegenstände beim Hantieren mit dem Ätzstäbchen.
- Silbernitrat führt zu braunschwarzen Flecken und diese lassen sich mit herkömmlichen Reinigungsmitteln nicht entfernen.
- Gesunde Haut, die ungewollt mit dem Kopf des Ätzstäbchens bestrichen wurde, gründlich mit fließendem Wasser und Schwamm reinigen, es kann dennoch zu einer harmlosen Dunkelfärbung dieser Hautstellen kommen. Die Dunkelfärbung verblasst nach etwa 10 – 14 Tagen.
- Sollte das Ätzstäbchen mit dem Auge in Berührung gekommen sein, sofort bei geöffnetem Lid unter fließendem Wasser mindestens 5 Minuten durchgehend spülen und danach einen Arzt konsultieren.
- Bei einer Anwendung im Bereich des Mundes ist unbedingt darauf zu achten, dass es zu keinem Verschlucken von Teilen des Köpfchens kommt.

KINDER: Die Anwendung bei Kindern unter 3 Jahren sollte nur nach individueller ärztlicher Beratung erfolgen.

WECHSELWIRKUNGEN: Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

SCHWANGERSCHAFT UND STILLZEIT:

Wenn Sie schwanger sind oder stillen oder wenn Sie vermuten schwanger zu sein oder beabsichtigen schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Medizinproduktes Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

VERKEHRSTÜCHTIGKEIT: Die Anwendung von Silbernitrat-Kaliumnitrat Ätztstäbchen hat keine Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit.

3. WIE SIND SILBERNITRAT-KALIUMNITRAT ÄTZSTÄBCHEN ANZUWENDEN?

Wenden Sie dieses Medizinprodukt immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben an. Fragen Sie bei Unsicherheit Ihren Arzt und Apotheker.

DIE EMPFOHLENE ANWENDUNGSMENGE:
Jeweils nur kleine Hautstellen behandeln.

ART DER ANWENDUNG: Äußerliche Anwendung. Unempfindliche saubere Unterlage vorbereiten. Zu behandelnde Stelle reinigen. Ätztstäbchen-Kopf befeuchten, indem man den Kopf des Ätztstäbchens kurz unter tropfendes Wasser hält. Das Köpfchen bekommt einen weißen oder leicht hellgrauen Farbton und ist jetzt zur Anwendung bereit. Betupfen oder bestreichen Sie mehrfach punktgenau und gleichmäßig die betroffene Stelle. Die behandelte Stelle färbt sich in kurzer Zeit schwarz und wird dann über einige Tage hinweg vom umgebenden Gewebe abgestoßen. Wiederholen Sie die Behandlung alle 2 – 3 Tage, bis der gewünschte Erfolg eintritt.

Die Stäbchen sind jeweils nur zur einmaligen Anwendung bestimmt.

BEI ÜBERDOSIERUNG DER SILBERNITRAT-KALIUMNITRAT ÄTZSTÄBCHEN: Zu häufige Anwendungen (ohne Veränderungen abzuwarten) kann in der Umgebung der behandelten Stelle zu Reizerscheinungen oder entzündlichen Reaktionen führen. In solchen Fällen sollte man vor weiteren Anwendungen ärztlichen Rat einholen.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN KÖNNEN AUFTRETEN?

Es können Überempfindlichkeitsreaktionen oder lokale Reizungen der Haut wie Jucken, Rötungen, Bläschen und leichtes Brennen auftreten. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in der Packungsbeilage angegeben sind.

5. WIE SIND SILBERNITRAT-KALIUMNITRAT ÄTZSTÄBCHEN AUFZUBEWAHREN?

Bitte in der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Die Packung trocken und lichtgeschützt aufbewahren. Nach Öffnen der Verpackung diese gut mit Klebeband bis zur weiteren Verwendung verschließen.

Bewahren Sie dieses Medizinprodukt für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Medizinprodukt nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden. Das Verfallsdatum finden Sie auf der Rückseite der Verpackung.

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Produkt zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN:

Die Verpackung besteht aus 10 Ätztstäbchen aus Buchenholz (starr) oder Kunststoff (elastisch) mit rundem Wirkstoffkopf mit Silbernitrat und Kaliumnitrat in einer lichtgeschützten Kunststoffhülle.

PACKUNGSGRÖSSEN UND PRODUKTVARIANTEN: Zusammensetzung 50 % Silbernitrat und 50 % Kaliumnitrat, Erhältlich als Silbernitrat Kaliumnitrat Ätztstäbchen und unter der Marke SILVERIN® Sticks 50 %

- 115 mm starr: 10 Stk, 100 Stk
- 115 mm elastisch: 10 Stk, 100 Stk
- 200 mm starr: 10 Stk, 100 Stk
- 200 mm elastisch: 10 Stk

Zusammensetzung 75 % Silbernitrat und 25 % Kaliumnitrat, Erhältlich unter der Marke SILVERIN® Sticks 75 %

- 115 mm starr: 100 Stk
- 115 mm elastisch: 100 Stk
- 200 mm starr: 10 Stk, 100 Stk

HERSTELLER:
BANO Healthcare GmbH, Annagasse 17,
2500 Baden, Österreich, www.bano.at.

Rösch & Handel ist eine Marke der
BANO Healthcare GmbH.

STAND DER GEBRAUCHSINFORMATION:
März 2025



Wir freuen uns
auf Ihr Feedback
zum Produkt.

V8253

