

SILVERIN® STÄBCHEN

Silbernitrat Ätztstäbchen

MEDIZINPRODUKT

V92601

ZWECKBESTIMMUNG

SILVERIN® STÄBCHEN sind Ätztstäbchen aus Holz oder Kunststoff, an deren Ende eine Mischung aus Silbernitrat und Kaliumnitrat aufgebracht ist. Durch Zuführen von Feuchtigkeit werden die Ätztstäbchen einsatzbereit. SILVERIN® STÄBCHEN ermöglichen eine einfache, punktuelle Handhabung, sodass die Wirkung auf genau begrenzte Stellen beschränkt bleibt.

SILVERIN® wird zur chemischen Kauterisierung bei oberflächlichen Blutungen, bei Nasenbluten, zur Behandlung von Warzen, von Schleimhautläsionen im Mund- und Genitalbereich und bei überschießender Wundgranulation (wildes Fleisch) angewendet. Weitere Anwendungsgebiete sind apthöse Stomatitis, Entfernung von Nabelschnurresten sowie der Einsatz im Wundmanagement, z.B. bei der Stomaversorgung.

WANN DÜRFEN SILVERIN® STÄBCHEN NICHT ANGEWENDET WERDEN?

SILVERIN® STÄBCHEN dürfen nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch gegen Silbernitrat oder Kaliumnitrat sind.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Bei allen ungewöhnlich gefärbten oder geformten Hautveränderungen, die nicht eindeutig als einfache Warze zu erkennen sind, sollten SILVERIN® STÄBCHEN nur unter ärztlicher Kontrolle angewendet werden.
- Den Kopf des Ätztstäbchens nicht mit feuchten Händen anfassen.
- Schützen Sie Ihre Kleidung und andere Gegenstände beim Hantieren mit dem Ätztstäbchen. Silbernitrat führt zu braunschwarzen Flecken, welche sich mit herkömmlichen Reinigungsmitteln nicht entfernen lassen.
- Gesunde Haut, die ungewollt mit dem Kopf des Ätztstäbchens berührt wurde, gründlich mit fließendem Wasser und Schwamm reinigen. Es kann dennoch zu einer harmlosen Dunkelfärbung dieser Hautstellen kommen. Die Dunkelfärbung verblasst nach etwa 10-14 Tagen.
- Sollte das Ätztstäbchen mit dem Auge in Berührung gekommen sein, sofort bei geöffnetem Lid unter fließendem Wasser mindestens 5 Minuten durchgehend spülen und danach einen Arzt konsultieren.
- Bei einer Anwendung im Bereich des Mundes ist unbedingt darauf zu achten, dass es zu keinem Verschlucken von Teilen des Köpfchens kommt. Bei Verschlucken sollte umgehend ein Arzt konsultiert werden.

- Die Anwendung bei Kindern unter 3 Jahren sollte nur durch medizinisches Fachpersonal erfolgen.
- Für die Behandlung von Nasenbluten bei Kindern oder eines Nabelgranuloms wird die Verwendung von SILVERIN® STÄBCHEN 50% empfohlen, um eine zu starke Kauterisierung zu vermeiden.
- Generell wird bei Anwendungen in der Nase empfohlen, immer nur ein Nasenloch zu behandeln und erst im Abstand von rund 3 Wochen – sofern erforderlich – das zweite Nasenloch.

SCHWANGERSCHAFT UND STILLZEIT

Wenn Sie schwanger sind oder stillen oder wenn Sie vermuten schwanger zu sein oder beabsichtigen schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Medizinproduktes Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

WECHSELWIRKUNGEN

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

VERKEHRSTÜCHTIGKEIT

Die Anwendung von SILVERIN® STÄBCHEN hat keine Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit.

WIE SIND SILVERIN® STÄBCHEN ANZUWENDEN?

Wenden Sie dieses Medizinprodukt immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben an. Fragen Sie bei Unsicherheiten Ihren Arzt und Apotheker. Jeweils nur die betroffene Stelle punktuell behandeln.

Kopf des Ätztstäbchens mit 1-2 Tropfen sauberem Wasser befeuchten. Verwenden Sie keine salzhaltigen Lösungen. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit vom Stäbchen auf die Umgebung tropft, da dies zu Flecken führen kann, die sich nicht mehr entfernen lassen. Die zu behandelnde Stelle punktgenau und gleichmäßig 1-2 Sekunden lang sanft betupfen oder das Stäbchen an der Stelle rollen. Nicht zu fest aufdrücken, um ein Zerbrechen des Köpfchens zu vermeiden.

Die Stäbchen sind zur einmaligen Anwendung bestimmt. Ein mehrmaliges Verwenden könnte ein Infektionsrisiko darstellen.

Warzenentfernung:

Die Laienanwendung sollte nur von Erwachsenen vorgenommen werden. Es ist darauf zu achten, dass SILVERIN® nur punktgenau angewandt wird.

Die behandelte Stelle verfärbt sich meist nicht sofort, jedoch innerhalb von 24 Stunden braunschwarz und wird dann über einige Tage hinweg vom umgebenden Gewebe abgestoßen. Beobachten Sie die Veränderung und wiederholen Sie die Behandlung bei Bedarf alle 2-3 Tage. Beenden Sie die Behandlung nach längstens 14 Tagen. Sollte sich keine Besserung zeigen, konsultieren Sie Ihren Arzt. Die Behandlung ist schmerzfrei.

Zu häufige Anwendungen (ohne Veränderungen abzuwarten) können zu Reizerscheinungen oder entzündlichen Reaktionen führen. In solchen Fällen sollte man vor weiteren Anwendungen ärztlichen Rat einholen.

Behandlung von Blutungen, Wunden, überschießender Wundgranulation, aphtöser Stomatitis und Nabelschnurresten:

Diese Anwendungen sollten ausschließlich von Ärzten und Fachpersonal durchgeführt werden.

Die behandelte Stelle färbt sich rasch grau. Es kann ein Brennen während der Behandlung spürbar sein. Meist ist eine Anwendung ausreichend.

WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Es können Überempfindlichkeitsreaktionen oder lokale Reizungen der Haut wie Jucken, leichtes Brennen, Rötungen sowie Bläschen auftreten. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in der Packungsbeilage angegeben sind. Bei schwerwiegenden Vorfällen kontaktieren Sie den Hersteller sowie die in Ihrem Land zuständige Gesundheitsbehörde.

WIE SIND SILVERIN® STÄBCHEN AUFZUBEWAHREN UND ZU ENTSORGEN?

Bitte in der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Die Packung trocken aufbewahren.

Nach Öffnen der Verpackung diese bis zur weiteren Verwendung verschließen. Die Köpfe der Stäbchen sind erst weißlich, können sich jedoch mit der Zeit dunkel verfärben. Diese Verfärbung hat keinen Einfluss auf die Wirkung des Produktes. Bewahren Sie dieses Medizinprodukt für Kinder unzugänglich auf. Verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr nach Ablauf des Verfallsdatums. Das Verfallsdatum finden Sie auf der Verpackung.

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Haushaltsabfall. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

INHALT DER PACKUNG/PACKUNGSGRÖßEN

Die Verpackung beinhaltet 10 Ätzzstäbchen aus Holz (starr) oder Kunststoff (elastisch) mit 50% Silbernitrat und 50% Kaliumnitrat.

Erhältlich in unterschiedlichen Packungsgrößen mit unterschiedlichen Wirkstoffkonzentrationen:

SILVERIN® STÄBCHEN 50%:	
115 mm STARR	10 STÜCK
115 mm ELASTISCH	10 STÜCK
200 mm STARR	10 STÜCK
200 mm ELASTISCH	10 STÜCK

SILVERIN® STICKS 50%	
115 mm STARR	10 STÜCK, 100 STÜCK
115 mm ELASTISCH	10 STÜCK, 100 STÜCK
200 mm STARR	10 STÜCK, 100 STÜCK
200 mm ELASTISCH	10 STÜCK

SILVERIN® STICKS 75%	
115 mm STARR	100 STÜCK
115 mm ELASTISCH	100 STÜCK
200 mm STARR	10 STÜCK, 100 STÜCK

ZUSAMMENSETZUNG

SILVERIN® STÄBCHEN 50% / SILVERIN® STICKS 50%:
50% Silbernitrat und 50% Kaliumnitrat
SILVERIN® STICKS 75%:
75% Silbernitrat und 25% Kaliumnitrat

HERSTELLER:

BANO Healthcare GmbH, Annagasse 17, 2500 Baden, Österreich, www.bano.at

Nähere Informationen entnehmen Sie unserer Homepage www.bano.at.

Rösch & Handel ist eine Marke der BANO Healthcare GmbH.

STAND DER GEBRAUCHSINFORMATION

Jänner 2026

Die Gebrauchsanweisung ist auch elektronisch (als Download) verfügbar unter www.bano.at.



Wir freuen uns auf Ihr Feedback zum Produkt.



Medizinprodukt



Hersteller



Verwendbar bis



Charge



Artikelnummer



Vor Sonnenlicht schützen



Trocken aufbewahren



Nicht wiederverwenden



(Elektronische)

www.bano.at

Gebrauchsanweisung beachten



Achtung!



UDI Nummer

(Unique Device Identifier)

