

RÖSCH UND HANDEL SILBERNITRAT-KALIUMNITRAT ÄTZSTÄBCHEN

Medizinprodukt

BITTE LESEN SIE DIE GEBRAUCHSINFORMATION SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE MIT DER ANWENDUNG STARTEN.

Wenden Sie dieses Medizinprodukt immer genau wie in der Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen, einen Rat benötigen oder Nebenwirkungen bemerken. Wenn sich nach mehrmaliger Anwendung kein Erfolg zeigt oder gar eine Verschlechterung eintritt, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

INHALTE DER GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Was sind Silbernitrat-Kaliumnitrat Ätzstäbchen und wofür werden sie verwendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Silbernitrat-Kaliumnitrat Ätzstäbchen beachten?
3. Wie sind Silbernitrat-Kaliumnitrat Ätzstäbchen anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen können auftreten?
5. Wie sind Silbernitrat-Kaliumnitrat Ätzstäbchen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS SIND SILBERNITRAT-KALIUMNITRAT ÄTZSTÄBCHEN UND WOFÜR WERDEN SIE VERWENDET?

Silbernitrat wirkt in geringen Konzentrationen bakterienabtötend, in hoher Konzentration schorfbildend-ätzend. Kaliumnitrat ist das Verdünnungsmittel, damit die Reaktion des Silbernitrats in milderer Form abläuft.

Die Mischung ist wie ein Streichholzkopf auf ein Stäbchen angebracht und nach Befeuchten zur einmaligen Anwendung einsatzbereit. Dieses Medizinprodukt ermöglicht eine punktweise Handhabung, sodass die Wirkung auf genau begrenzte Stellen beschränkt bleibt.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Zur Behandlung von Warzen und Hautwucherungen, bei Rhagaden, zur Blutstillung bei oberflächlichen Blutungen und Nasenbluten.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON SILBERNITRAT- KALIUMNITRAT ÄTZSTÄBCHEN BEACHTEN?

Die Silbernitrat-Kaliumnitrat Ätzstäbchen dürfen nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch gegen Silbernitrat oder Kaliumnitrat sind.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Bei allen ungewöhnlich gefärbten oder ungewöhnlich geformten Hautveränderungen, die nicht eindeutig als „wildes Fleisch“ oder als einfache Warzen zu erkennen sind, sollen die Ätzstäbchen nur unter ärztlicher Kontrolle angewendet werden.
- Den Kopf (Ätzmittel) des Silbernitrat-Kaliumnitrat Ätzstäbchens nicht mit feuchten Händen anfassen.
- Schützen Sie Ihre Kleidung und andere Gegenstände beim Hantieren mit dem Ätzstäbchen.
- Silbernitrat führt zu braunschwarzen Flecken und diese lassen sich mit herkömmlichen Reinigungsmitteln nicht entfernen.
- Gesunde Haut, die ungewollt mit dem Kopf des Ätzstäbchens bestrichen wurde, gründlich mit fließendem Wasser und Schwamm reinigen, es kann dennoch zu einer harmlosen Dunkelfärbung dieser Hautstellen kommen. Die Dunkelfärbung verblasst nach etwa 10-14 Tagen.
- Sollte das Ätzstäbchen mit dem Auge in Berührung gekommen sein, sofort bei geöffnetem Lid unter fließendem Wasser mindestens 5 Minuten durchgehend spülen und danach einen Arzt konsultieren.

KINDER:

Die Anwendung bei Kindern unter 3 Jahren sollte nur nach individueller ärztlicher Beratung erfolgen.

GEMEINSAME ANWENDUNG VON SILBERNITRAT-KALIUMNITRAT ÄTZSTÄBCHEN MIT ANDEREN ARZNEIMITTELN:

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

SCHWANGERSCHAFT UND STILLZEIT :

Wenn Sie schwanger sind oder stillen oder wenn Sie vermuten schwanger zu sein oder beabsichtigen schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat, weil die Unbedenklichkeit der Anwendung von Silbernitrat und Kaliumnitrat für Mutter und Kind noch nicht nachgewiesen ist.

VERKEHRSTÜCHTIGKEIT:

Die Anwendung von Silbernitrat-Kaliumnitrat Ätzstäbchen hat keine Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit.

3. WIE SIND SILBERNITRAT- KALIUMNITRAT ÄTZSTÄBCHEN ANZUWENDEN?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben an. Fragen Sie bei Unsicherheit Ihren Arzt und Apotheker.

DIE EMPFOHLENE ANWENDUNGSMENGE:

Jeweils nur kleine Hautstellen behandeln.

ART DER ANWENDUNG:

Anwendung auf der Haut. Unempfindliche saubere Unterlage vorbereiten. Zu behandelnde Stelle reinigen. Ätztäbchen-Kopf befeuchten, indem man den Kopf des Ätztäbchens kurz unter tropfendes Wasser hält. Das Köpfchen bekommt einen weißen oder leicht hellgrauen Farbton und ist jetzt zur Anwendung bereit. Betupfen oder bestreichen Sie mehrfach punktgenau und gleichmäßig die betroffene Stelle. Die behandelte Stelle färbt sich in kurzer Zeit schwarz und wird dann über einige Tage hinweg vom umgebenden Gewebe abgestoßen. Sollte die Therapie nicht erfolgreich gewesen sein, indem sich eine Änderung oder Verfärbung der behandelten Stelle zeigt, können Sie nach 2-3 Tagen die Behandlung wiederholen, bis sich die verfärbten Stellen allmählich ablösen.

Die Stäbchen sind jeweils nur zur einmaligen Anwendung bestimmt.

Kopf des Ätztäbchens nicht mit feuchten Händen angreifen.

BEI ÜBERDOSIERUNG DER SILBERNITRAT-KALIUMNITRAT ÄTZSTÄBCHEN:

Zu häufige Anwendungen (ohne Veränderungen abzuwarten) kann in der Umgebung der behandelten Stelle zu Reizerscheinungen oder entzündlichen Reaktionen führen. In solchen Fällen sollte man vor weiteren Anwendungen ärztlichen Rat einholen.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN KÖNNEN AUFTRETEN?

Es können Überempfindlichkeitsreaktionen oder lokale Reizungen der Haut wie Jucken, Rötungen, Bläschen und leichtes Brennen auftreten. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in der Packungsbeilage angegeben sind.

5. WIE SIND SILBERNITRAT-KALIUMNITRAT ÄTZSTÄBCHEN AUFZUBEWAHREN?

Bitte in der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Die Packung trocken und lichtgeschützt aufbewahren. Nach Öffnen der Verpackung diese gut mit Klebeband bis zur weiteren Verwendung verschließen.

Bewahren Sie dieses Medizinprodukt für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Medizinprodukt nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden. Das Verfallsdatum finden Sie auf der Rückseite der Verpackung.

Die Ätztäbchen dürfen nur im Sondermüll entsorgt werden.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN:

Die Verpackung besteht aus 10 Ätztäbchen aus Buchenholz (starr) oder Kunststoff (elastisch) mit rundem Wirkstoffkopf mit Silbernitrat und Kaliumnitrat in einer dunkelblauen lichtundurchlässigen Kunststoffhülle.

PACKUNGSGRÖSSEN:

Erhältlich in folgenden Packungsgrößen:

10 Stk. mit 115mm Länge und 10 Stk. mit 200mm Länge

Die Ätztäbchen sind in den Varianten elastisch und starr erhältlich.

HERSTELLER:

BANO Healthcare GmbH, Im Gries 22, A-6580 St. Anton/Arzlberg, www.bano-healthcare.at

STAND DER GEBRAUCHSINFORMATION: JÄNNER 2016

