

RAPID gegen Hühneraugen

Wirkt rasch und zuverlässig

MEDIZINPRODUKT

Physikalische Wirkung durch Abschälen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Medizinproduktes beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Medizinprodukt immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

WANN WIRD RAPID ANGEWENDET?

RAPID dient der raschen Entfernung von Hühneraugen und Schwielen. Die enthaltene Lösung weicht übermäßige Hornhaut auf, sodaß sie nach 5-7 Tagen mühelos entfernt werden kann.

WIESO ENTSTEHEN HÜHNERAUGEN UND SCHWIELEN?

Hühneraugen und Schwielen können bei einseitiger, übermäßiger Belastung der Haut entstehen und sind lokale Hornhautverdickungen.

Meist sind drückende Schuhe oder Fehlstellungen des Fußes die Ursache für Hühneraugen. Am häufigsten treten sie auf der 4. und 5. Zehe oder auf der Fußunterseite auf und können mitunter heftige Schmerzen hervorrufen.

WIE IST RAPID ANZUWENDEN?

Morgens und abends wird das Hühnerauge oder die Schwielle mit RAPID eingepinselt. Abends soll der Anwendung ein warmes Fußbad vorausgehen, wobei die Hautpartie etwa fünf Minute lang im warmen Wasser aufgeweicht und dann gut abgetrocknet werden soll. Wenn möglich die verhornte Haut zusätzlich mit einem Bimsstein oder einer Feile vorsichtig abschaben. Achten Sie darauf, daß Sie die Haut dabei nicht verletzen.

Gesunde Haut um die zu behandelnde Stelle herum gut mit Fettcreme oder Vaseline abdecken und Hühnerauge mittels beigepacktem Pinsel bestreichen; es bildet sich ein milchigweißes, schützendes Häutchen, das nicht entfernt werden soll. 2 mal täglich wiederholen. Nach 5-7 Tagen kann das Hühnerauge meist problemlos entfernt werden. Sollte noch ein Rest, die sogenannte Wurzel des Hühnerauges, nach Entfernung der weißen Haut bemerkbar sein, wiederholt man die Behandlung.

Die Anwendung bei Schwielen erfolgt analog zu der von Hühneraugen.

WANN DARF RAPID NICHT ANGEWENDET WERDEN?

- Bei Überempfindlichkeit gegen einen Bestandteil des Produktes.
- Bei nicht eindeutig als Hühneraugen identifizierten Hautveränderungen.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Eine Anwendung auf größeren Hautflächen ist insbesondere bei Kleinkindern und Personen mit schweren Durchblutungsstörungen (z.B. Diabetikern) zu vermeiden.

WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

RAPID kann bei gesunder Haut Hautreizungen hervorrufen. Um das zu vermeiden deckt man die umgebende, gesunde Haut mit Fettcreme oder Vaseline ab – siehe Anwendungshinweise oben.

Bei Auftreten von lang anhaltenden Reizerscheinungen (starkes Brennen oder Jucken, Entzündungen) Behandlung absetzen und gegebenenfalls ärztlichen Rat einholen.

WARNHINWEISE

RAPID ist leicht entflammbar, daher nicht bei offenem Feuer verwenden oder rauchen. Flasche stets gut verschließen. Lagerung bei Zimmertemperatur. Bewahren Sie dieses Medizinprodukt für Kinder unzugänglich auf und vermeiden Sie Augen- und Schleimhautkontakt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach dem aufgedruckten Haltbarkeitsdatum.

Zusammensetzung

Colloidium, Salicylsäure, Milchsäure, Aceton, Rizinusöl.

🏭 Hersteller:

BANO Healthcare GmbH, Annagasse 17, 2500 Baden, Österreich, www.bano-healthcare.at.

Rösch & Handel ist eine Marke der BANO Healthcare GmbH.

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2017